

## Instruções para Planejamento de Cirurgia Guiada - **Edentulos Totais**

### Imagens necessárias:

- .DICOM da região (maxila ou mandíbula) com prótese em boca
- .DICOM da prótese com as marcações em guta percha

### Preparo da prótese para tomografia:


1. Fazer de **5 a 6 cavitações desalinhadas** de aproximadamente 2mm de diâmetro e profundidade na flange da prótese com broca esférica (sem perfurar a flange).



2. Condensar a guta percha preenchendo a cavitação com o auxílio de espátula



→ As cavitações também podem ser realizadas numa duplicação da montagem dos dentes em resina transparente (GUIA TOMOGRAFICA)

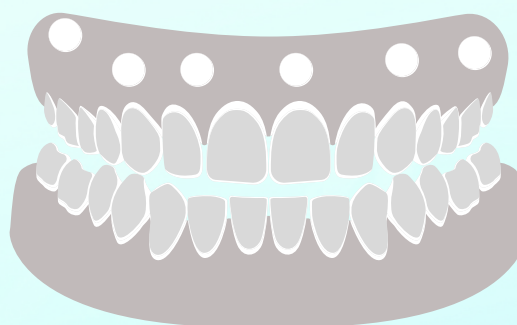

Em casos de **edentulismo na arcada antagonista**, a **instabilidade oclusal** pode desadaptar a prótese. Devendo ser feito um registro de mordida em silicone pesado. O registro deve ser utilizado no momento da tomada tomográfica.

## **Dicas para um exame adequado**

### **Tomografia do paciente:**

.DICOM com FOV em toda a arcada de interesse

De preferência com afastamento de tecidos moles (lábios, bochecha e língua)

Suave pressão sobre a prótese no momento do exame, para que fique muco-suportada

Utilizar registro de mordida em silicone pesado

A prótese ou o reembasamento provisório devem estar bem adaptados

### **Tomografia da prótese:**

Toda a prótese deve ser englobada no volume

Para tomógrafos sem suporte, utilizar um suporte não reflexível (isopor, cortiça, etc)



Pra tomógrafos que vibram de forma indesejada da plataforma, fixar a prótese ao suporte com fita dupla face para estabiliza-la



## Teremos duas pastas de arquivos:

1. .DICOM do paciente
2. .DICOM da prótese

## Envio de arquivos:

-  - WeTransfer
-  - Google Drive

## Aprovação do Projeto:

Nossa equipe irá elaborar o planejamento virtual e enviar um relatório para sua avaliação via whatsapp ,em 3 dias úteis. Caso necessário, uma videoconferência é efetuada para melhores esclarecimentos.

Logo que aprovado o projeto, a peça é impressa, e enviada em até mais 3 dias úteis.



**(48) 988194222**



**contato@mord.com.br**



**www.mord.com.br**